



Potrzeby klientów naszą największą motywacją

Powstała w 1929 roku firma Hill-Rom® od początku ma w swojej ofercie szeroki asortyment najwyższej jakości innowacyjnych produktów, usług i szkoleń o kompleksowym charakterze pozwalających na tworzenie bezpiecznego i sprawnie działającego środowiska pracy dla personelu medycznego a także wdrażanie skutecznych klinicznie terapii.

Zawsze u Twego boku

Firma Hill-Rom® posiada swoje przedstawicielstwa w ponad 80 krajach i zatrudnia 6500 osób. Będąc przedsiębiorstwem o zasięgu globalnym, firma Hill-Rom® ma możliwość partnerskiej współpracy z wieloma placówkami opieki zdrowotnej.

Codzienne wyzwania naszą inspiracją

Program Progresywnej Mobilizacji (Progressive Mobility™) wdrożony przez firmę Hill-Rom® zapewnia pacjentom mobilność na każdym etapie leczenia. Wprowadzenie programów terapeutycznych Safe Skin™, No Falls™, Clear Lungs™ i Safe Backs pozwala zapewnić pacjentom bezpieczeństwo oraz opiekę na najwyższym poziomie dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii dla lepszych wyników klinicznych.

Nieustająca czynna opieka

Rozwiązania wprowadzane przez firmę Hill-Rom® umożliwiają opiekę medyczną w szpitalnych oddziałach ratunkowych, oddziałach: położniczo-ginekologicznych, bariatrycznych, intensywnej opieki medycznej, salach chorych a także w trakcie opieki długoterminowej i opieki domowej.

Nazwa oraz znak graficzny Hill-Rom są zarejestrowanymi znakami towarowymi Hill-Rom Services Inc. Auto Contour, Point-of Care Controls, No Falls, Safe Skin, Safe Backs, EasyChair i Line-of-Site są zarejestrowanymi znakami towarowymi Hill-Rom Services, Inc.



Hill-Rom®

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

France +33 (0)2 97 50 92 12
United Kingdom +44 (0)1530 411000
Deutschland +49 (0)211 16450-0
Nederland +31 (0)347 32 35 32
Italia + 39 (0)2 950541
Suisse/Schweiz +41 (0)21 706 21 30
(deutschsprachig) +41 (0)21 706 21 38

Österreich +43 (0)2243 28550
Ireland +353 (0)1 413 6005
Iberia +34 (0)93 6856000
Nordic Countries +46 (0)920 47 47 11
Export Contact your local Hill-Rom® distributor or contact your Area Manager via website or call +1 812 934 8173

www.hill-rom.com

Firma Hill-Rom® zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w konstrukcji i specyfikacjach poszczególnych modeli bez wcześniejszego powiadomienia. Hill-Rom® udziela wyłącznie pisemnej gwarancji obejmującej zarówno sprzedaż, jak i wynajem produktów.
© 2010 Hill-Rom SARL, WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Skuteczność przede wszystkim.




Łóżko Hill-Rom® 900

Hill-Rom

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

Czy nowoczesne rozwiązania
muszą być skomplikowane?

Wręcz przeciwnie!

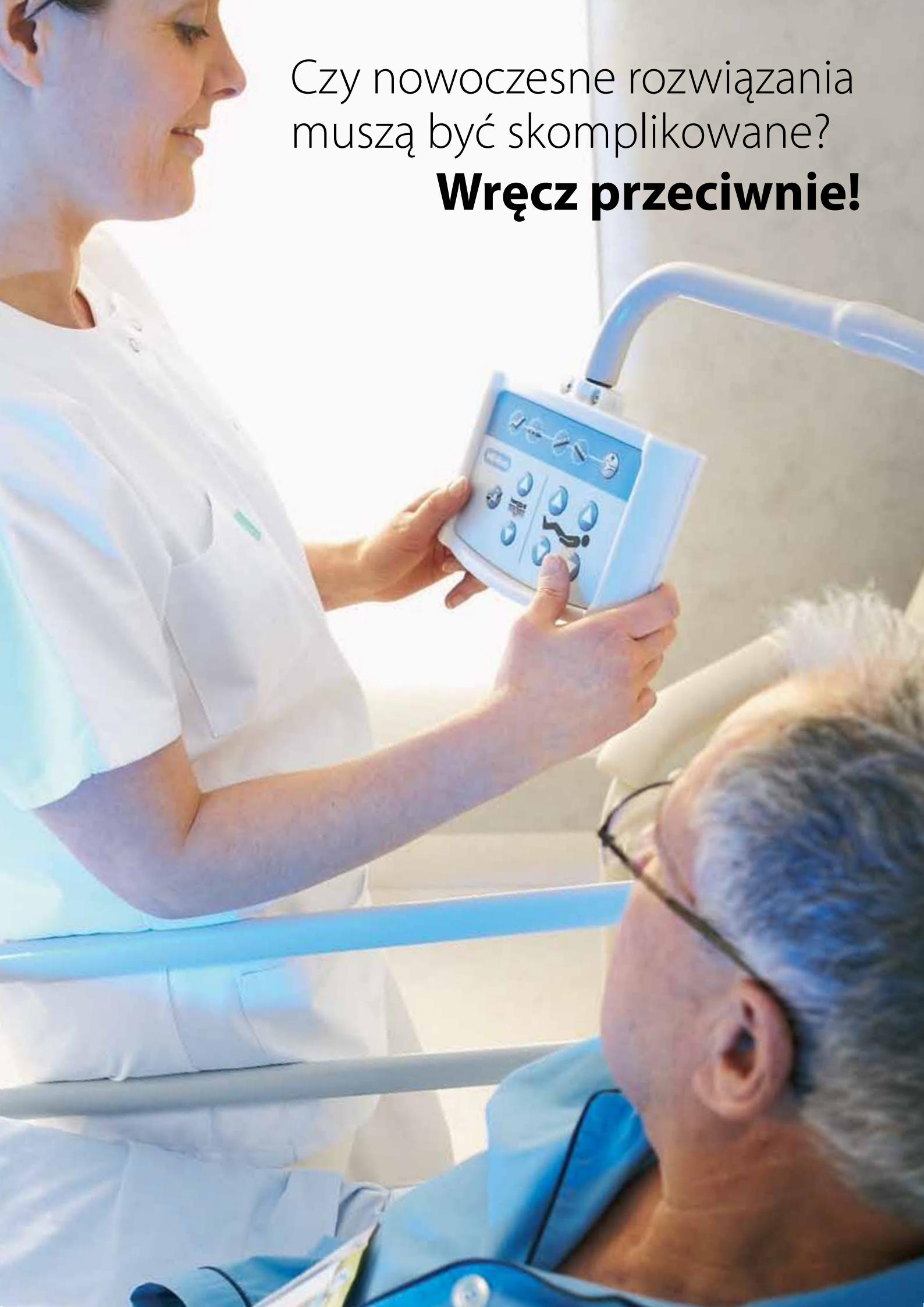

Ułatwienie opieki nad pacjentem.

Łóżko Hill-Rom® 900 zostało stworzone mając na uwadze łatwość użytkowania i bezpieczeństwo – zarówno pacjenta, jak i personelu medycznego.

Intuicyjność



Sterowniki łóżka oznaczone są symbolami graficznymi, co zapewnia intuicyjną obsługę wszystkich funkcji. Przyjazne dla użytkownika funkcje ułatwiają wykonywanie codziennych zadań, zwiększając jednocześnie autonomię pacjenta i zapewniając mu wygodę. Dzięki temu personel mniej czasu poświęca obsłudze łóżka, a więcej może go poświęcić opiece nad pacjentem.

Ergonomia



Współpracując z placówkami opieki zdrowotnej przeanalizowaliśmy sposób, w jaki opiekunowie wykonują swoją pracę w otoczeniu łóżek i umieściliśmy sterowniki Point-of-Care™ w miejscu, w którym personel przebywa najczęściej – czyli obok pacjenta. Stosujemy rozwiązania cechujące się ergonomią. Ponieważ opiekunowie podnoszą i opuszczają bariery boczne łóżka nawet do 16 razy w ciągu dnia, umieściliśmy zwolnienia blokad barierki na wysokości roboczej dla personelu. Dzięki temu wyeliminowane zostało zbędne pochylanie się, sięganie czy obchodzenie łóżka.

Wydajność



Funkcje łóżka Hill-Rom® 900 pozwalają na optymalne jego wykorzystanie, co zapewnia pacjentowi opiekę na najwyższym poziomie. Monitorowanie częstotliwości stosowania funkcji pozycjonowania (pozycja krzesła EasyChair™, pozycja wyjściowa, pozycje Trendelenburga i anti-Trendelenburga, wypoziomowanie leża) pomoże określić zakres szkoleń, jakie powinien odbyć personel.

Wszelkie istotne i często powtarzane czynności można wykonać jednym ruchem ręki.



Przedłużanie łóżka jednym ruchem



Pozycja krzesła uzyskiwana za pomocą jednego przycisku EasyChair™



Pozycja wyjściowa uzyskiwana za pomocą jednego przycisku



Poziomowanie leża za pomocą jednego przycisku



Ułatwienie mobilizacji pacjenta.

Zachowanie bezpieczeństwa przy mobilizacji pacjenta pełni kluczową rolę w procesie powrotu do zdrowia. Łóżko Hill-Rom® 900 posiada funkcje ułatwiające opiekę nad pacjentem na każdym etapie mobilizacji – od pozycjonowania go na łóżku ustawionym w pozycji „krzesła” aż po wstawanie z łóżka.

Program Safe Backs – zapobieganie urazom kręgosłupa wśród personelu

Autonomia i rehabilitacja pacjenta idą w parze ze zmniejszonym wysiłkiem opiekuna. Łóżko Hill-Rom® 900 umożliwia prowadzenie bezpiecznego i skutecznego procesu uruchamiania pacjenta.



Wskaźnik kąta nachylenia Line-of-site™ ułatwia ułożenie pacjenta w odpowiedniej pozycji, dzięki możliwości ustawienia odpowiedniego nachylenia segmentów łóżka.



Przycisk EasyChair™ umożliwia zmianę ułożenia pacjenta do pozycji w pełni siedzącej. Ponadto w analogiczny sposób, za pomocą jednego przycisku, można wypoziomować leże bądź sprowadzić łóżko do najniższej pozycji.

Dzięki ergonomicznej konstrukcji łóżka pacjent może współpracować w trakcie mobilizacji (zmiany pozycji na łóżku czy obracania na bok), zwiększając tym samym swoją autonomię i przyspieszając proces rehabilitacji.



Ułatwienie mobilizacji pacjenta.

Program No Falls_™ – zapobieganie upadkom i zakleszczeniom.

Zaprojektowane z naciskiem na ergonomię łóżko Hill-Rom_® 900 pozwala zwiększyć bezpieczeństwo i skuteczność procesu mobilizacji pacjenta.

Poprzez naciśnięcie tylko jednego przycisku możliwe jest ustawienie łóżka Hill-Rom_® 900 w pozycji ułatwiającej

pacjentowi bezpieczne opuszczenie łóżka. Chowane uchwyty ułatwiające pacjentowi wyjście z łóżka stanowią bezcenną pomoc dla personelu. Podnoszone i blokowane jednym ruchem, zapewniają pacjentowi stabilną podporę podczas wstawania.



Program Safe Skin_™ – zapobieganie i leczenie odleżyn

Zapobieganie i leczenie odleżyn oraz uszkodzeń tkanek wymaga zastosowania odpowiednich procedur i narzędzi, wśród których kluczowe są możliwości ustawienia poszczególnych segmentów łóżka pod różnymi kątami i wyboru odpowiedniego materaca.

Zsynchronizowane ruchy segmentów łóżka


Zsynchronizowane ruchy segmentów łóżka zapewniają optymalne ułożenie i wygodę pacjenta, minimalizując jednocześnie ucisk na odcinek brzuszny a także tarcie i siły ścinające.



Inteligentna funkcja Auto Contour™

Inteligentna funkcja Auto Contour™ nie tylko zapobiega zsuwaniu się pacjenta w dół łóżka podczas podnoszenia segmentu oparcia, ale również umożliwia personelowi i pacjentowi regulowanie kąta między segmentami oparcia i ud, zapewniając pacjentowi maksymalną wygodę.

Dzięki możliwości zastosowania szerokiej gamy materacy terapeutycznych firmy Hill-Rom® łóżko Hill-Rom® 900 pozwala zmniejszyć ryzyko powstawania odleżyn.

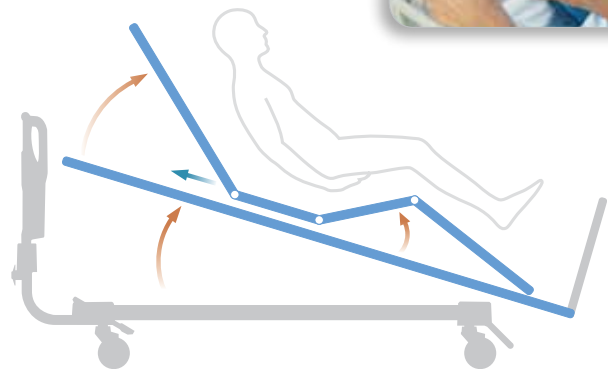



Bezpieczne środowisko dla pacjenta

Liczba pacjentów mających problemy ze sprawnością stale się zwiększa, a wraz z nią rośnie ryzyko poślizgnięć, potknięć i upadków. Hill-Rom® pomaga chronić pacjentów przed urazami, tworząc wokół łóżka bezpieczne otoczenie.

Zmniejszenie ryzyka upadku pacjenta

Inteligentne podświetlenie nocne

Opiekun na pierwszy rzut oka jest w stanie określić, czy łóżko ustawione jest w pozycji zapewniającej bezpieczeństwo podczas snu – nawet jeśli nie znajduje się on w sali chorych. Podświetlenie nocne będzie świecić się na zielono, gdy łóżko ustawione zostanie w najniższym położeniu. Podświetlana jest również podłoga w miejscu, w którym pacjent schodzi z łóżka, co ułatwia mu poruszanie się w ciemnej lub słabo oświetlonej sali i zapobiega potknięciu się o ewentualne przeszkody.

W przypadku uniesienia łóżka z pozycji najniższej podświetlenie zmienia kolor na pomarańczowy. O zmianie pozycji powiadamia personel także kontrolka na panelu sterowania.

Kontrola bezpieczeństwa



System podwójnej blokady barierki bocznych zapobiega przypadkowemu opuszczeniu barierki.

Zmniejszenie ryzyka zakleszczenia się pacjenta



Staramy się, aby łóżka, materace, barierki boczne i inne akcesoria były maksymalnie do siebie dopasowane.



Regulowane klamry obejmujące materac automatycznie dopasowują się do jego szerokości, zapobiegając zakleszczeniu się pacjenta między materacem a barierkami bocznymi. Umożliwiają one również zastosowanie wraz z łóżkiem różnych materacy terapeutycznych.

Zmniejszenie ryzyka infekcji



Otwarta konstrukcja łóżka ułatwia czyszczenie i odkażanie.

Gładkie powierzchnie i zdejmowane panele można w łatwy sposób czyścić chemicznie lub parowo i odkażać.

Po prostu niezawodne.

Jakość Hill-Rom®


Nowy system regulacji wysokości zastosowany w łóżku Hill-Rom® 900 jest trwały i niezawodny. Dzięki dwóm punktom mocowania znajdującym się na ramie łóżka oraz leżu, rozłożenie obciążenia jest równomierne na całym leżu, zapewniając optymalną stabilność boczną.



Konstrukcja oraz materiał, z którego wykonane są ramiona nośne, zostały dobrane na podstawie komputerowej symulacji obciążenia tych kluczowych komponentów.

Dzięki temu łóżko jest w pełni bezpieczne nawet przy obciążeniu wynoszącym 880 kg.

Przetestowane zgodnie ze standardami Hill-Rom®.

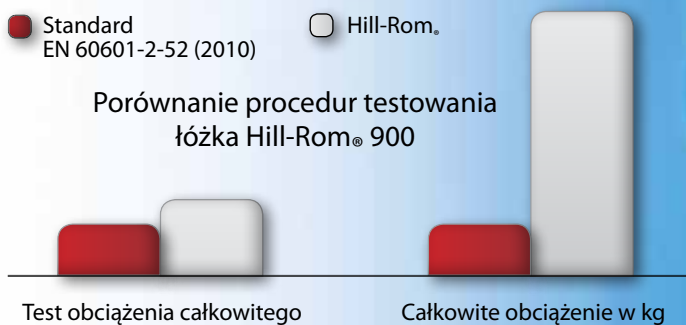

Łóżko Hill-Rom® 900 zostało przetestowane pod kątem wymagań przekraczających wymagania normatywne w certyfikowanym laboratorium badawczym firmy Hill-Rom®, co miało na celu zapewnienie niezawodnego działania produktu przez cały okres jego eksploatacji.

W trakcie testów zastosowano łączne obciążenie wynoszące ponad 14 000 000 kg*, co ponad 6 razy przekracza wymagania określone standardem EN 60601-2-52 (2010).

* Jako łączne obciążenie rozumie się obciążenie w kg pomnożone przez liczbę cykli określonych w procedurze danego testu.



Sterowniki łóżka poddano gruntownej kontroli jakości obejmującej działanie oraz odporność na zwiłżanie powierzchniowe i wstrząsy.

Zaprojektowane by sprawnie działać



Dzięki prostej konstrukcji łóżka Hill-Rom® 900 oraz rozbudowanej ofercie usług firmy Hill-Rom®, łóżko jest inwestycją, która szybko się zwróci. Łóżko zostało zaprojektowane w taki sposób, aby dostęp do podstawowych elementów był łatwy i bezpieczny, co znacznie upraszcza rutynowe czynności serwisowe. Do wykonania tych czynności niezbędnych jest tylko pięć narzędzi.



Monitor Hill-Rom® Care informuje użytkownika o konieczności przeprowadzenia przeglądu okresowego, co pozwoli zapewnić optymalne działanie łóżka oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego. Narzędzie to wskazuje również, w jaki sposób łóżko jest wykorzystywane, co umożliwia bardziej efektywne zarządzanie flotą łóżek.



Nasz opatentowany system kółek umożliwia zdejmowanie i wymianę kółek poziomo z boku łóżka, co ułatwia i przyspiesza czyszczenie i wymianę.

Usługi Hill-Rom®

Firma Hill-Rom® oferuje szereg usług, których celem jest zaspokojenie potrzeb dowolnej placówki opieki zdrowotnej.

Serwis części zamiennych Parts Online zapewnia możliwość przeglądania i zamawiania części zamiennych przez całą dobę. Ze strony internetowej Hill-Rom® można również pobrać instrukcje obsługi i instrukcje serwisowe oraz dokumentację techniczną naszych produktów.