



# MPT-II モバイル感熱式ミニプリンター

## 取扱説明書



発行元：

Welch Allyn, Inc.

4341 State Street Road

Skaneateles Falls, NY 13153 USA

[www.welchallyn.com](http://www.welchallyn.com)

**# 39511-4 (CD)**

DIR 80022372 Ver.D、改訂日 2022 年 6 月  
8108699 Rev 4



## 1. 注意

- バッテリーは Welch Allyn 公認のものだけを使用してください。非公認バッテリーは液漏れのおそれがあり、安全上の問題が発生します。
- 端子が接続するようにバッテリーを装着してください。
- バッテリーは一般廃棄物と区別してください。未分別の一般廃棄物として処分しないでください。
- プリンターは熱くなることがあります。
- 印刷中はカバーを開けないでください。
- プリンターは湿気のない場所に保管してください。水分に触れるとプリンターが故障するおそれがあります。
- プリンターを長期保管する場合は、バッテリーを取り外してください。
- 充電器は Welch Allyn 公認のものだけを使用してください。非公認の充電器を使用した場合、本装置に不具合が生じることがあります。

## 2. 一般情報

### MPT-II プリンターキットの内容物：


- 1 台 MPT-II プリンター
- 1 個 MPT-II 充電式バッテリーパック
- 2 本 40mm 径感熱紙
- 1 個 電源。WA # 39407
- 5 個 世界対応電源アダプタ
- 1 冊 ユーザーマニュアル

接続ケーブルは装置ごとに別売りです。

### 3. 操作方法

#### 用紙の取り付け：

ふたの両側を押して開き、写真のように感熱紙ロールを差し込み、ふたを閉めます。

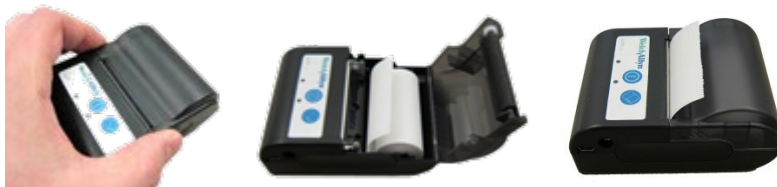

感熱紙の補充は最寄りのWelchAlllyn 代理店にご注文ください。


注意：プリンターを分解しないでください。

#### バッテリーパックの挿入：

写真のようにバッテリーを挿入します。



## 電源を入れる：








電源をONまたはOFFにするには、電源ボタンを2秒間押します。

電源ONの場合は短いブザー音が1回、電源OFFの場合は短いブザー音が2回鳴ります。



プリンターの電源がバッテリーの場合は、緑色の電源インジケーターが点灯します。



## インジケーター：

緑色のLED ランプ	青色のLED ランプ	ステータス	音声	注記
消灯 	速い点滅 	充電中		電源 On の場合
消灯 	点灯 	充電中		電源 Off の場合
消灯 	遅い点滅 	バッテリーの 充電が必要		
消灯 	点灯 	充電完了		電源 On の場合
消灯 	消灯 	充電完了		電源 Off の場合
点灯 	消灯 	電源 ON、バッテ リー電源		
遅い点滅 	遅い点滅 	用紙切れ	ブザー音	
遅い点滅 	消灯 	スリープモード		

### セルフテスト：

プリンターの電源がOFFの状態では用紙送り  ボタンと電源ボタン  を同時に長押しします。約3秒後にブザー音が鳴り、両方のボタンを放すと、現在のステータス情報と文字サンプルのテストページが印刷されます。

### 用紙送り：

電源ONの状態では用紙送り  ボタンを押します。ボタンを押している間は用紙が送られます。

### ワイヤレス設定：

ワイヤレスで印刷をするには、本装置とのペアリングが必要です。

ペアリングは次の手順で行います。

1. プリンターの電源を入れます。
2. 本装置／PCがワイヤレス端末の検索を始めます。
3. 端末リストに“PRT-XX-XX”という端末名が表示されます。
4. ペアリング終了です。

ワイヤレス検索を開始するための詳細な手順については、ユーザーマニュアルを参照してください。

注記：検索中に対象範囲内で複数のプリンターの電源をONにしないでください。

1台のプリンターで最大8台の装置とペアリングができます。それ以上の装置とペアリングすると、最も古い装置から削除されます。

#### 4. 技術仕様

##### 印刷モード：

感熱ラインドット式印刷

印刷幅：48mm

解像度：8ドット/mm(203dpi)

1行あたりドット数：384ドット

##### 感熱紙：

紙幅 = 56 mm +/- 1 mm 最大 40mm 径

##### プリンター機構寿命：

印字パルス  $10^8$  回または用紙長さ 50 km

##### インターフェイスオプション：

USB (Mini-USB)

RS-232 (6ピン、ミニDIN)


赤外線 (RAW\_IR、VIR、IrDA)

ワイヤレス Class2 (最大10m 範囲) - シリアルポートプロファイル (SPP)



### RS-232 ピン説明図：

1. TXD
2. RTS
3. DND
4. 予備ピン
5. RXD
6. 予備ピン

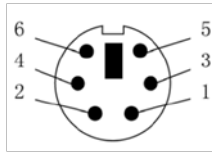

### バッテリーパック：

2 セルリチウムイオンバッテリーパック 7.4V-1500mAh

### 電源／充電器

39407

最大消費電流 0.5A



### 物理特性：

寸法：102 x 75 x 45 mm（幅 x 長さ x 高さ）

重量：205 g（バッテリー含む、用紙含まず）

### 環境仕様：

動作温度範囲：-10°C ～ 50°C（14F ～ 122F）

動作湿度範囲：20% ～ 85%

保管温度範囲：-20°C ～ 70°C（-4F ～ 158F）



