



MPT-II Mobil Termal Mini Yazıcı

Kullanım talimatları



Dağıtımçı:

Welch Allyn, Inc.

4341 State Street Road

Skaneateles Falls, NY 13153 ABD

www.welchallyn.com

39511-4 (CD)

DIR 80022374 Sür. D,

Revizyon tarihi: 2022-06

8108699 Rev 4

1. İkazlar

- Yalnızca Welch Allyn onaylı pillerle kullanın. Onaylı olmayan piller sızıntı yaparak güvenlik tehlikesine yol açabilir.
- Pili, eş bağlantı uçları birbirine temas edecek şekilde takın.
- Pilleri genel atıklardan ayrı tutun. Pilleri ayrıştırılmamış kentsel atık ile birlikte atmayın.
- Yazıcı ısınabilir.
- Yazdırma işlemi sırasında kapağı açmayın.
- Yazıcıyı kuru bir yerde tutun. Sıvı maddelere maruz kalmak yazıcıda hasara yol açabilir.
- Yazıcıyı uzun süre kullanmadan saklayacaksanız pili çıkarın.
- Yalnızca Welch Allyn onaylı şarj cihazlarını kullanın. Onaylı olmayan şarj cihazları cihaza zarar verebilir.

2. Genel bilgiler

MPT-II yazıcı seti içeriği:

- 1 parça MPT-II yazıcı
- 1 parça MPT-II tekrar şarj edilebilir pil paketi
- 2 parça 40 mm çaplı termal kağıt
- 1 parça Güç kaynağı, WA # 39407
- 5 parça Dünya genelinde bağlantı için güç kaynağı adaptörleri
- 1 parça Kullanıcı kılavuzu

Cihaza göre bağlantı kablosu ayrı sunulur.

3. Çalışma

Kağıt yükleme:

Yanlara bastırarak kapağı açın, gösterildiği gibi kağıt rulosunu yerleştirin ve kapağı kapatın.



Yerel Welch Allyn dağıtıcınızdan yeniden kağıt sipariş edebilirsiniz.


Dikkat: Yazıcıyı parçalarına ayırmayın.

Pil paketini yerleştirme:

Pili gösterildiği gibi yerleştirin.



Gücü açma:













GÜÇ AÇMA veya KAPATMA için GÜÇ DÜĞMESİNİ  iki saniye basılı tutun.

GÜÇ AÇILDIĞINDA bir kısa bip sesi, KAPATILDIĞINDA iki kısa bip sesi duyulur.



Yazıcıya pil ile güç sağlanıyorsa
Yeşil Güç Göstergesi yanar.



Göstergeler:

Yeşil LED göstergesi	Mavi LED göstergesi	Durum	Ses	Not
Kapalı 	Hızlı yanıp sönme 	Şarj oluyor		Güç Açık
Kapalı 	Açık 	Şarj oluyor		Güç Kapalı
Kapalı 	Yavaş yanıp sönme 	Pil neredeyse tükenmiş		
Kapalı 	Açık 	Şarj etme tamamlandı		Güç Açık
Kapalı 	Kapalı 	Şarj etme tamamlandı		Güç Kapalı
Açık 	Kapalı 	Güç AÇIK, pil çalışır durumda		
Yavaş yanıp sönme 	Yavaş yanıp sönme 	Kağıt yok	Bip	
Yavaş yanıp sönme 	Kapalı 	Uyku modu		

Otomatik test:

Yazıcının gücü KAPALIYKEN, KAĞIT BESLEME  düğmesini basılı tutun ve ardından eşzamanlı olarak GÜÇ DÜĞMESİNİ  basılı tutun. Yaklaşık 3 saniyenin ardından bip sesi duyulduğunda her iki düğmeyi de serbest bırakın; geçerli durum bilgileri ve karakter örneklerini içeren bir test sayfası yazdırılacaktır.

Kağıt besleme:

Cihaz açıldığında KAĞIT BESLEME  düğmesine basın. Düğme basılı tutulduğu süre boyunca kağıt beslenecektir.

Kablosuz bağlantı ayarı:

Kablosuz bağlantı ile yazdırmak için önce cihazla eşleşme yapılması gerekir.

Eşleşme işlemi aşağıdaki gibi yapılır:

1. Yazıcıyı çalıştırın
2. Cihazın / bilgisayarın diğer kablosuz cihazları araması için bekleyin
3. Cihaz listesinde "PRT-XX-XX" adlı bir cihazın görünmesi gerekir.
4. Eşleşmeyi tamamlayın

Kablosuz bağlantı aramasını başlatma konusunda detaylı talimatlar için lütfen cihazınızın kullanıcı kılavuzuna bakın.

Not: Arama sırasında birden fazla açık ve kapsama alanında yazıcının bulunmamasına dikkat edin.

Tek bir yazıcı ile 8'e kadar cihazı eşleştirmek mümkündür. Daha fazla sayıda cihazın eşleştirilmesi durumunda en eski cihazlar silinecektir.

4. Teknik özellikler

Yazdırma modu:

Termal satır nokta yazdırma

Yazdırma genişliği: 48 mm

Çözünürlük: 8 nokta/mm (203 dpi)

Satır başına nokta: 384 nokta

Termal kağıt:

Kağıt genişliği = 56 mm +/- 1 mm maks. 40 mm çap

Yazıcı mekanizması ömrü:

10^8 baskı darbesi veya 50 km kağıt

Arayüz seçenekleri:

USB (Mini-USB)

RS-232 (6 pimli mini-DIN)

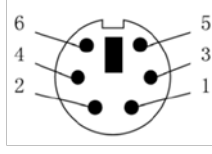
Kızıl ötesi (RAW_IR, VIR, IrDA)

Kablosuz Sınıf 2 (10 m aralığa kadar) – seri port profili (SPP)



RS-232 kablo işlev şeması:

1. TXD
2. RTS
3. DND
4. Yedek pimler
5. RXD
6. Yedek pimler

**Pil paketi:**

2 hücreli Lityum İyon pil paketi 7,4 V-1500 mAh

Güç kaynağı / Şarj cihazı:

39407

Maksimum akım tüketimi 0,5 A

**Fiziksel özellikler:**

Boyut: 102 x 75 x 45 mm (GxUxY)

Ağırlık: Kağıt yokken pil dahil 205 g

Çevresel özellikler:

Çalışma sıcaklık aralığı: -10C ila 50C (14F ila 122F)

Çalışma nem aralığı: %20 ila %85

Saklama sıcaklık aralığı: -20C ila 70C (-4F ila 158F)

