

Welch Allyn® OAE 听力筛查仪

快速参考卡

该快速参考卡提供使用 Welch Allyn® OAE 筛查仪进行测试的步骤。请参阅 Welch Allyn OAE 筛查仪使用说明，了解全面的操作指南和信息。

OAE 听力筛查仪

将电缆连接筛查仪

1. 关闭筛查仪，将 HDMI 连接器牢固插入筛查仪顶部的插槽中。插头只能从一个方向插入。

连接探针管


1. 将新的探针管插入探头中，直至其完全固定。
当探针管完全进入探针头时，正确插入的探针管会咔哒一声固定到位。
2. 要取下探针管，请抓住管身，轻微扭动，轻轻用力即可将其从探针头中拉出。
没必要为每个耳塞更换探针管；只要探针管是透明的，就可以重复使用。

安装耳塞



警告 安全风险。耳塞属于一次性耗材，每个患者使用后必须换新。

1. 选择适当规格的耳塞。
2. 将耳塞推到探针管上并轻微扭动。
3. 确保耳塞完全固定在探针管上。耳机和探针管护套之间不应有缝隙。

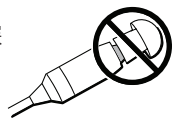

选择测试协议

DPOAE 筛查仪提供两个 (2) 协议选项：“DP 4s”是指在每种频率下最多测试 4 秒，“DP 2s”是指在每种频率下最多测试 2 秒。TEOAE 筛查仪提供两个 (2) 协议选项：“TE 64s”的最长测试时间是 64 秒，“TE 32s”的最长测试时间是 32 秒。Main (主) 菜单会显示上次使用的协议。

1. 按下 Main (主) 菜单上的 **Down** (向下) 控制面板按钮。Protocol (协议) 菜单随即显示。
2. 按下 **Left** (向左) 或 **Right** (向右) 控制面板按钮，可选择所需的协议。
3. 按下 **Up** (向上) 控制面板按钮，可返回 Main (主) 菜单并开始测试。

执行筛查测试

1. 将带有耳塞的探针插入耳道内。
2. 按下 **Down** (向下) 控制面板按钮，打开筛查仪电源。Main (主) 菜单随即出现。
3. 按下 **Left** (向左) 或 **Right** (向右) 控制面板按钮，可选择要测试的耳朵。筛查仪会执行一次自动化探针和校准测试。
4. 筛查自动开始。测试完成后，筛查仪返回 Main (主) 菜单并显示 **Pass** (通过)、**Refer** (转诊)、**Noisy** (嘈杂)、**No Seal or Fit Err** (未封闭或贴合错误) 消息。
5. 如果出现 **Noisy** (嘈杂)、**No Seal or Fit Err** (未封闭或贴合错误) 消息，请重新调节探针放置，然后重新测试。
6. 要查看测试结果，请按下 **Down** (向下) 控制面板按钮，然后再测试另一侧耳朵。如果结果未被审核，则在结果打印或传输至数据经理之前无法查看。
7. 要继续下一项筛查测试，请将探针插入另一侧耳内。按下 **Left** (向左) 或 **Right** (向右) 控制面板按钮，可测试另一侧耳朵。

打印测试结果

您必须提供已启用无线功能的选配热敏打印机，才能从筛查仪进行打印。请参阅 Welch Allyn OAE 筛查仪使用说明。

1. 确认筛查仪已与打印机配对。
2. 确认打印机已开机并准备好打印。
3. 按下 Main (主) 菜单中的 **Up** (向上) 控制面板按钮。Connection (连接) 屏幕随即出现。
4. 按下 **Left** (向左) 或 **Right** (向右) 控制面板按钮，可连接打印机。打印所有保存的结果。

按钮和菜单

导航按钮

向下按钮

- 按一次：打开电源
- 按一次：进入 Protocol (协议) 菜单
- 按下并前往 Date (日期) 菜单。按住即可进入设备设置菜单。

向右按钮

- 主菜单：开始测试右耳。
- 所有菜单：浏览所选菜单中的选项

向左按钮

- 主菜单：开始测试左耳
- 所有菜单：浏览所选菜单中的选项

向上按钮

- 按一次：在菜单结构上向上移动一级
- 按一次：在 Main (主) 菜单中，测试完成时移至 Print (打印) 菜单

菜单结构

1. 开机屏幕：显示筛查仪的软件和固件版本
2. 主菜单：显示测试每只耳朵时所选的测试协议和 **L** (左) 和 **R** (右)；可前往并选择保存的协议
3. 日期/时间菜单：显示日期和时间并允许使用向左和向右控制面板按钮进行更改
4. 系统菜单：显示设备操作设置；允许使用向左和向右控制面板按钮进行更改
5. 协议菜单：显示协议设置并允许使用向左和向右控制面板按钮进行更改。筛查仪上可显示设置变化。



Welch Allyn 技术支持

www.welchallyn.com/about/company/locations.html

39511-4 GSI 8108699

© 2022 Welch Allyn, Inc.

DIR 编号 80022371 版本C，修订日期：2022-06

WelchAllyn®