

Welch Allyn® OAE İşitme Tarama Cihazı

Hızlı başvuru kartı

Bu hızlı başvuru kartı Welch Allyn® OAE Tarama Cihazı ile test başlatılmasına yönelik adımları sunar. Eksiksiz talimatlar ve bilgi için Welch Allyn OAE Tarama Cihazı Kullanım Talimatlarına bakın.

OAE işitme tarama cihazı

Kabloyu tarama cihazına bağlama

1. Tarama cihazı kapalıyken HDMI konektörünü, tarama cihazının üzerindeki sokete sıkıca yerleştirin. Fiş yalnızca tek yönde takılabilir.

Prob hortumunu takma

1. Yeni bir prob hortumunu, prob başlığına tamamen oturana kadar yerleştirin. Doğru bir şekilde yerleştirilmiş bir prob hortumu, prob başlığına tamamen yerleştirildiğinde yerine sıkıca oturur.

2. Bir prob hortumunu çıkarmak için hortumu kavrayın ve hafifçe çevirerek yavaşça prob başlığından ayırın.


Prob hortumunu her kulaklık ucu için değiştirmeye gerek yoktur; prob hortumu temiz olduğu sürece hortum yeniden kullanılabilir.

Kulaklık ucu takma



UYARI Sağlık riski. Kulaklık uçları tek kullanımlıdır ve her hastadan sonra değiştirilmeleri gerekir.

1. Uygun boyutta bir kulaklık ucu seçin.
2. Kulaklık ucunu prob hortumuna itin ve hafifçe çevirin.
3. Kulaklık ucunun proba tamamen oturduğundan emin olun. Kulaklık ucuyla prob hortumunun halkası arasında boşluk olmamalıdır.

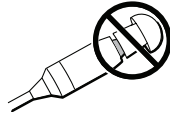

Test protokolünü seçme

DPOAE tarama cihazı iki (2) protokol seçeneği sunar: Frekans başına maksimum 4 saniye süre ile DP 4s testi ve frekans başına maksimum 2 saniye süre ile DP 2s testi. TEOAE tarama cihazı iki (2) protokol seçeneği sunar: Maksimum 64 saniyelik TE 64s testi ve maksimum 32 saniyelik TE 32s testi. Kullanılan son protokol Ana menüde görünür.

1. Ana menüde **Aşağı** kontrol paneli düğmesine basın. Protokol menüsü görünür.
2. İstediğiniz protokolü seçmek için **Sol** veya **Sağ** kontrol paneli düğmesine basın.
3. Ana menüye geri dönmek ve test etme işlemine başlamak için **Yukarı** kontrol paneli düğmesine basın.

Tarama testi gerçekleştirme

1. Kulaklık ucu takılı bir probu kulak kanalına yerleştirin.
2. **Aşağı** kontrol paneli düğmesine basarak tarama cihazını çalıştırın. Ana menü görünür.
3. Test edilecek kulağı seçmek için **Sol** veya **Sağ** kontrol paneli düğmesine basın. Tarama cihazı otomatik bir prob ve kalibrasyon testi gerçekleştirir.

Tarama otomatik olarak başlar. Test tamamlandığında tarama cihazı Ana menüye geri döner ve **Pass** (Geçti), **Refer** (Sevk), **Noisy** (Parazitli) ya da **No Seal or Fit Err** (Sızdırmazlık Sağlanamadı veya Yerine Oturma Hatası) mesajlarından birini gösterir.

4. **Noisy** (Parazitli) ya da **No Seal or Fit Err** (Sızdırmazlık Sağlanamadı veya Yerine Oturma Hatası) mesajlarından biri görüntülenirse probu yeniden yerleştirin ve testi tekrarlayın.
5. Diğer kulağı test etmeden önce test sonuçlarını incelemek için **Aşağı** kontrol paneli düğmesine basın. Sonuçları test sonrasında incelemeszeniz ancak yazdırdıktan ya da veri yöneticisine aktardıktan sonra görebilirsiniz.
6. Bir sonraki tarama testine devam etmek için probu diğer kulağa yerleştirin. Diğer kulağı test etmek için **Sol** veya **Sağ** kontrol paneli düğmesine basın.

Test sonuçlarını yazdırma

Tarama cihazından yazdırma işlemi gerçekleştirmek için isteğe bağlı kablolu bağlantı özellikli termal yazıcınızın olması gerekir. Welch Allyn OAE Tarama Cihazı Kullanım Talimatlarına bakın.

1. Tarama cihazının yazıcıyla eşleştirildiğini onaylayın.
2. Yazıcının açık ve yazdırma işlemi için hazır olduğunu onaylayın.
3. Ana menüde **Yukarı** kontrol paneli düğmesine basın. Connection (Bağlantı) ekranı görünür.
4. Yazıcıya bağlanmak için **Sol** veya **Sağ** kontrol paneli düğmesine basın. Kayıtlı tüm sonuçlar yazdırılır.

Düğmeler ve menüler

Navigasyon düğmeleri

Aşağı düğmesi

- Tek basma: cihazı açma
- Tek basma: Protocol (Protokol) menüsüne girme
- Basın ve Date (Tarih) menüsüne gidin. Cihaz ayarları menülerine girmek için basılı tutun

Sağ düğmesi

- Ana menüde: sağ kulakta bir test başlatma
- Tüm menülerde: seçili olan menüdeki seçenekler arasında ilerleme

Sol düğmesi

- Ana menüde: sol kulakta bir test başlatma
- Tüm menülerde: seçili olan menüdeki seçenekler arasında ilerleme

Yukarı düğmesi

- Tek basma: menüde bir üst seviyeye çıkma
- Tek basma: Main menu (Ana menü) üzerinde, test tamamlandıktan sonra Print (Yazdırma) menüsüne geçme

Menü yapısı

1. Power up (Açılış) ekranı: tarama cihazının yazılım ve donanım sürümünü görüntüler
2. Main menu (Ana menü): seçili test protokolünü ve her kulağın test edilebilmesi için **L** (Sol) ve **R** (Sağ) seçeneklerini görüntüler; kayıtlı protokollere geçmeyi ve bunları seçmeyi sağlar
3. Date/Time (Tarih/Zaman) menüsü: tarihi ve zamanı gösterir ve sol ile sağ kontrol paneli düğmeleri aracılığıyla tarihi ve zamanı değiştirmeyi sağlar
4. System (Sistem) menüsü: cihaz çalıştırma ayarlarını gösterir; sol ile sağ kontrol paneli düğmeleri aracılığıyla değişiklik yapılmasını sağlar
5. Protocol (Protokol) menüsü: protokol ayarlarını gösterir ve sol ile sağ kontrol paneli düğmeleri aracılığıyla değişiklik yapılmasını sağlar. Ayarlarda yapılan değişiklikler tarama cihazında görüntülenir.



Welch Allyn Teknik Destek

www.welchallyn.com/about/company/locations.html

39511-4

GS1 8108699

© 2022, Welch Allyn, Inc.

DIR No. 80022370 Sür. C, Revizyon tarihi: Haziran 2022

WelchAllyn®