



Welch Allyn Connex 360 Moniteur des signes vitaux

Version 1.1 du logiciel



Guide de référence rapide

Il existe différentes options de configuration et de paramétrage du moniteur de signes vitaux Connex 360. La configuration ou les paramètres réels de votre moniteur peuvent ne pas correspondre à ceux décrits dans ce guide de référence rapide. Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre moniteur, reportez-vous au *mode d'emploi du moniteur Connex 360*.

baxter.com 80030216 Ver. B • Date de révision : 08/2025

Baxter, Connex 360 et Welch Allyn sont des marques commerciales de Baxter International, Inc. ou de ses filiales.

Table des matières

| | |
|---|----|
| Bouton d'alimentation..... | 2 |
| État de la batterie | 2 |
| Connexion du médecin, saisie manuelle..... | 2 |
| Connexion du médecin, lecteur RFID..... | 3 |
| Démarrage/Arrêt de la mesure de la pression artérielle..... | 3 |
| Démarrage des intervalles..... | 4 |
| Arrêt des intervalles | 4 |
| Indicateurs et icônes de commandes..... | 4 |
| Saisie manuelle des paramètres et des modificateurs..... | 5 |
| Gestion des dossiers des patients..... | 6 |
| Ajout d'un patient | 6 |
| Nettoyage de l'équipement..... | 7 |
| Saisie des scores d'alerte précoce..... | 7 |
| Déverrouillage de l'écran | 10 |

Bouton d'alimentation



Appuyez sur le bouton d'alimentation situé en bas à droite du boîtier de l'appareil pour :

- Mettez le moniteur sous tension.
- Mettez le moniteur hors tension.
- Placez le moniteur en mode Sleep (Veille). Cette option n'est pas disponible lorsqu'une condition d'alarme est active.
- Réactivez le moniteur à partir du mode Sleep (Veille).

État de la batterie



(90 %) Procédure de recharge



(4:23) Temps de fonctionnement restant approximatif (HH:MM)




Batterie absente ou déchargée

Connexion du médecin, saisie manuelle

À partir de l'écran Home (Accueil)




1. Appuyez sur le bouton de connexion du médecin  dans le coin supérieur gauche.
2. Utilisez le clavier à l'écran pour saisir le Clinician ID (ID du médecin) et le Password (Mot de passe). Vous pouvez également scanner un code-barres, si cette option est activée.
3. Appuyez sur **Log in** (Connexion).
4. Le moniteur **Connex 360** peut être configuré pour plusieurs types de connexion. Reportez-vous au *mode d'emploi du moniteur Connex 360*.

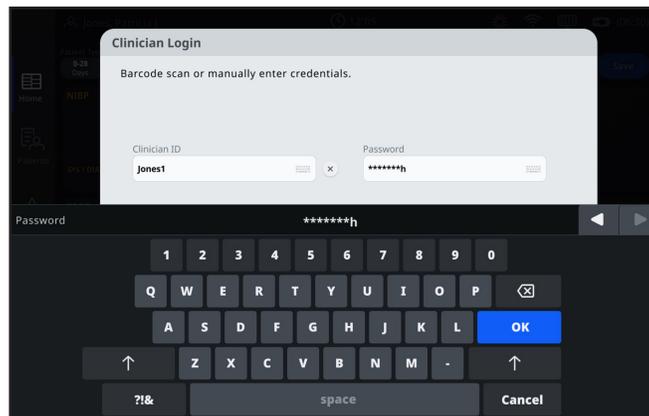

Connexion du médecin, lecteur RFID

Via l'écran de connexion

1. Placez un badge de médecin (RFID ou code-barres 2D) de manière à ce que le faisceau du lecteur RFID soit placé sur le badge de médecin. Le système vérifiera le numéro et connectera le médecin.
2. (Facultatif) Appuyez sur l'icône du clavier pour saisir manuellement les informations d'identification. À l'aide du clavier, entrez votre ID et votre mot de passe dans les champs correspondants, puis appuyez sur **Log in** (Connexion).
3. (Facultatif) Appuyez sur **Quick Access** (Accès rapide) pour ignorer la connexion et accéder à l'écran Home (Accueil) sans ID de médecin.
4. (Facultatif) Appuyez sur **Power Down** (Mise hors tension) pour mettre le moniteur hors tension.

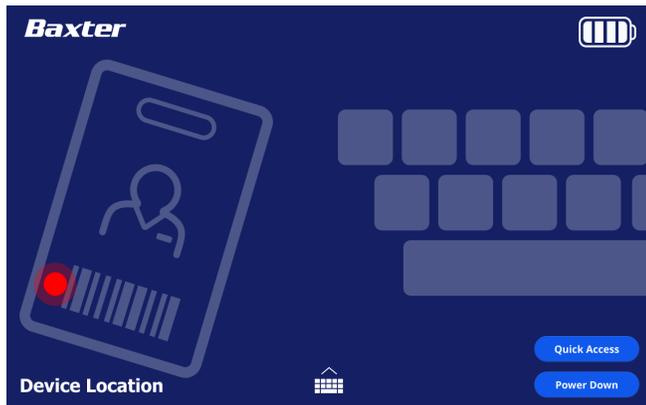


Démarrage/Arrêt de la mesure de la pression artérielle



1. Positionnez correctement le brassard de pression artérielle sur le patient.
2. Dans le volet NIBP (PNI), appuyez sur l'icône Start (Démarrage) pour commencer à mesurer la pression artérielle.
3. Dans le volet NIBP (PNI), appuyez sur l'icône Stop (Arrêt) si vous devez annuler la mesure.

Démarrage des intervalles

1. Dans l'onglet Home (Accueil), appuyez sur .
2. Sélectionnez **Automatic** (Automatique), **Stat**, **Program** (Programme) ou **Averaging** (Moyennage), puis saisissez ou sélectionnez les paramètres souhaités.

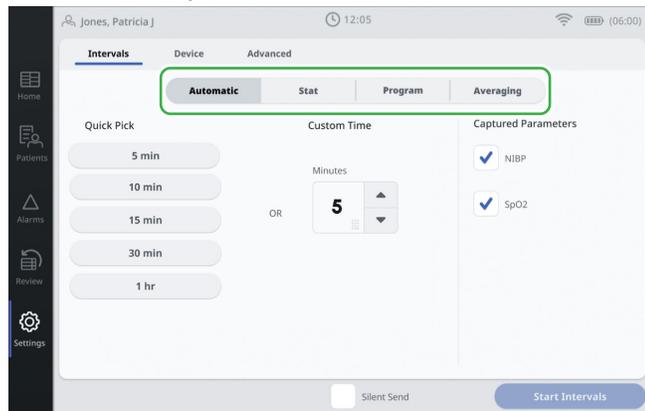

3. Appuyez sur **Start intervals** (Démarrage des intervalles).

Arrêt des intervalles


1. Dans l'onglet Home (Accueil), appuyez sur .
2. Appuyez sur **Stop intervals** (Arrêt intervalles).

Indicateurs et icônes de commandes

| Icônes | Descriptions |
|---|---|
|  | Alarme désactivée Aucune notification visuelle ou sonore n'est activée. |
|  | Alarme activée Les notifications visuelles et sonores sont activées. |
|  | Son de l'alarme désactivé Seules les notifications visuelles sont activées. |
|  | Son de l'alarme mis en pause Le compte à rebours est activé. |
|  | Alarme active Appuyez sur ce symbole pour mettre en pause ou couper le son. |
|  | Alarmes multiples actives Appuyez sur ce symbole pour mettre en pause ou couper le son. |
|  | Alarme de priorité moyenne Appuyez sur ce symbole pour ajuster les seuils d'alarme ou désactiver l'alarme. |
|  | Alarme de priorité élevée Appuyez sur ce symbole pour ajuster les seuils d'alarme ou désactiver l'alarme. |

Saisie manuelle des paramètres et des modificateurs

1. Appuyez sur un volet de paramètre, tel que NIBP (PNI). L'écran Modifiers and Parameters Manual Entry (Saisie manuelle des modificateurs et des paramètres) s'affiche. Si des modificateurs sont préconfigurés, ils peuvent être saisis sur cet écran.

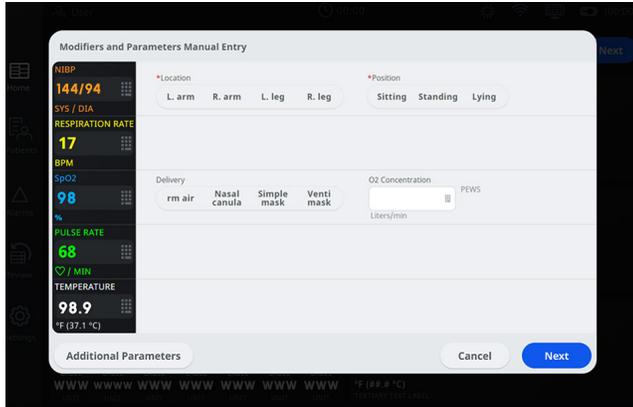

2. Appuyez sur le volet NIBP (PNI) et restez dessus pour ouvrir le clavier de saisie manuelle de la PNI. Saisissez manuellement la valeur du paramètre en sélectionnant le champ, en saisissant la valeur sur le clavier, puis en appuyant sur **OK**.
3. Si des paramètres supplémentaires sont configurés, appuyez sur **Additional Parameters** (Paramètres supplémentaires).


4. Une fois tous les Modifiers (Modificateurs) terminés, appuyez sur **OK**. Si une boîte de dialogue s'affiche et indique certains champs obligatoires à remplir, saisissez les valeurs manquantes et appuyez sur **OK** lorsque vous y êtes invité.
5. Appuyez sur **Save** (Enregistrer) pour enregistrer les données et effacer l'écran.



Gestion des dossiers des patients

Les dossiers non envoyés des patients peuvent être envoyés sur le réseau ou supprimés.

1. Appuyez sur l'onglet **Review** (Examen).

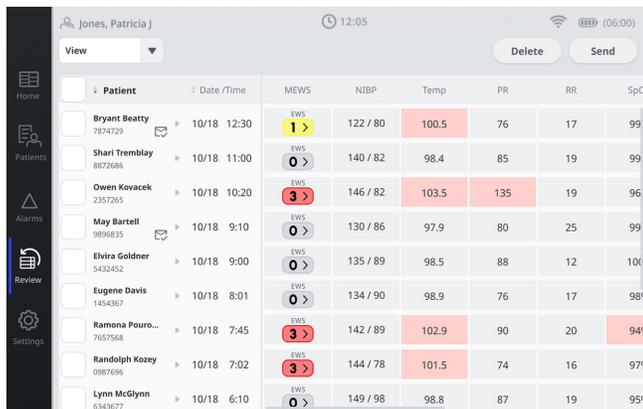


| Patient | Date / Time | MEWS | NIBP | Temp | PR | RR | SpO |
|-----------------------------|-------------|------------|----------|-------|-----|----|-----|
| Bryant Beatty 7874729 | 10/18 12:30 | EWS 1 > | 122 / 80 | 100.5 | 76 | 17 | 99 |
| Shari Tremblay 8872686 | 10/18 11:00 | EWS 0 > | 140 / 82 | 98.4 | 85 | 19 | 99 |
| Owen Kovacek 2357265 | 10/18 10:20 | EWS 3 > | 146 / 82 | 103.5 | 135 | 19 | 96 |
| May Bartell 9896835 | 10/18 9:10 | EWS 0 > | 130 / 86 | 97.9 | 80 | 25 | 99 |
| Elvira Goldner 5432452 | 10/18 9:00 | EWS 0 > | 135 / 89 | 98.5 | 88 | 12 | 100 |
| Eugene Davis 1454367 | 10/18 8:01 | EWS 0 > | 134 / 90 | 98.9 | 76 | 17 | 98 |
| Ramona Pourou... 7657968 | 10/18 7:45 | EWS 3 > | 142 / 89 | 102.9 | 90 | 20 | 94 |
| Randolph Kozye 0987696 | 10/18 7:02 | EWS 3 > | 144 / 78 | 101.5 | 74 | 16 | 97 |
| Lynn McGlynn 6343677 | 10/18 6:10 | EWS 0 > | 149 / 98 | 98.8 | 87 | 19 | 95 |

2. Sélectionnez les dossiers en appuyant sur la case à cocher en regard de chaque nom de patient souhaité.
3. Appuyez sur **Send** (Envoyer) pour transmettre les dossiers sur le réseau ou sur **Delete** (Supprimer) pour supprimer les dossiers de façon permanente.
4. Une fois l'envoi réussi, l'icône  est attribuée à l'enregistrement.

Ajout d'un patient

1. Si la saisie manuelle du patient est activée, appuyez sur l'onglet **Patients**.
2. Appuyez sur **New Patient** (Nouveau patient).
3. Appuyez sur n'importe quel champ, puis saisissez les informations sur le patient. Notez que l'âge du patient est un champ obligatoire.

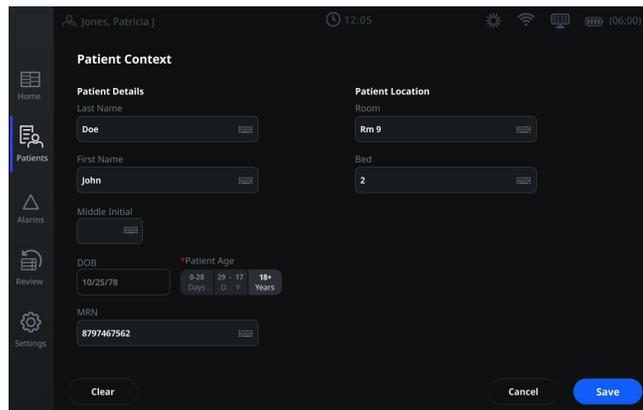

Patient Context

Patient Details

Last Name:

First Name:

Middle Initial:

DOB: *Patient Age: 8-28 Days, 29-17 Years, 18+ Years

MRN:

Patient Location

Room:

Bed:

Clear Cancel Save

4. Appuyez sur **Save** (Enregistrer) pour enregistrer et revenir à l'onglet Home (Accueil).



REMARQUE Vous pouvez utiliser un lecteur en option pour scanner l'ID patient. Lorsque l'ID scanné correspond à un patient de la liste, les informations sur le patient scannées sont envoyées vers l'écran Home (Accueil). Lorsque l'ID scanné ne correspond pas à un patient de la liste, le numéro scanné est ajouté au champ MRN (Dossier médical du patient).

Nettoyage de l'équipement

Reportez-vous au mode d'emploi pour plus de détails sur le nettoyage du moniteur, les solutions de montage et les accessoires. Certains agents nettoyants et désinfectants ne sont pas adaptés à certains composants. Utilisez uniquement des agents nettoyants approuvés et respectez les restrictions indiquées dans le mode d'emploi. L'utilisation d'agents nettoyants non autorisés peut endommager le moniteur, ses composants ou ses accessoires et annulera la garantie. Reportez-vous à la section « Préparation du nettoyage de l'équipement », dans le mode d'emploi pour obtenir une liste des agents nettoyants autorisés.

 **ATTENTION** Certains agents nettoyants et désinfectants ne sont pas adaptés à certains composants de l'appareil. Utilisez uniquement des agents nettoyants et désinfectants autorisés et respectez les limitations applicables à certains composants répertoriés dans le mode d'emploi. L'utilisation d'agents nettoyants et désinfectants non autorisés risque d'endommager les composants.

 **ATTENTION** Ne vaporisez pas d'agent nettoyant ou désinfectant directement sur le moniteur. L'infiltration d'un excès de solution à l'intérieur du moniteur risque d'endommager ses composants internes. Veillez également à ce que le chiffon de nettoyage et de désinfection ne soit pas imbibé de solution.


 **ATTENTION** N'utilisez pas de solution à base d'eau de Javel pour nettoyer les contacts électriques métalliques. Ceci endommagerait l'appareil.

Saisie des scores d'alerte précoce




REMARQUE Le personnel autorisé peut sélectionner et configurer des scores d'alerte précoce personnalisés et définir des scores manuels.


1. Dans l'onglet Home (Accueil), appuyez sur la section d'évaluation des scores personnalisés de l'écran. Dans l'exemple d'écran suivant, la section Modified Early Warning Score (MEWS) (Score d'alerte précoce modifié) est la section d'évaluation des scores personnalisés.

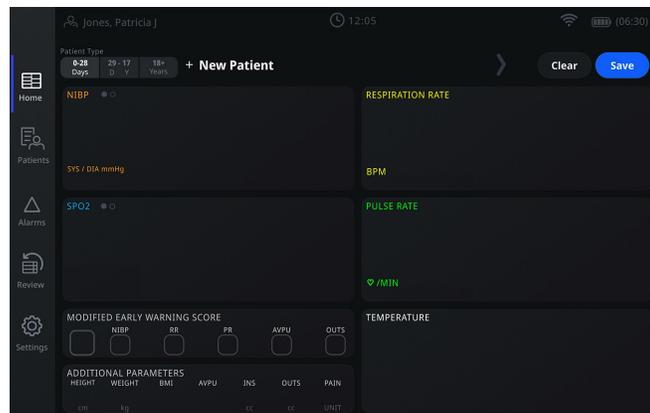

- Sur l'écran Custom score selection (Sélection des scores personnalisés), appuyez sur le bouton radio en regard d'un score personnalisé disponible. Les paramètres nécessaires pour ce score personnalisé sont affichés à droite. Dans l'exemple d'écran suivant, Modified Early Warning Score (MEWS) (Score d'alerte précoce modifié) est le score personnalisé présélectionné. Appuyez sur le bouton **Additional Parameters** (Paramètres supplémentaires) ou **Modifiers** (Modificateurs) pour saisir les informations requises. Les paramètres portant une coche indiquent les paramètres définis terminés pour le score personnalisé sélectionné. Les paramètres incomplets ne portent pas de coche et aboutissent à un score partiel.

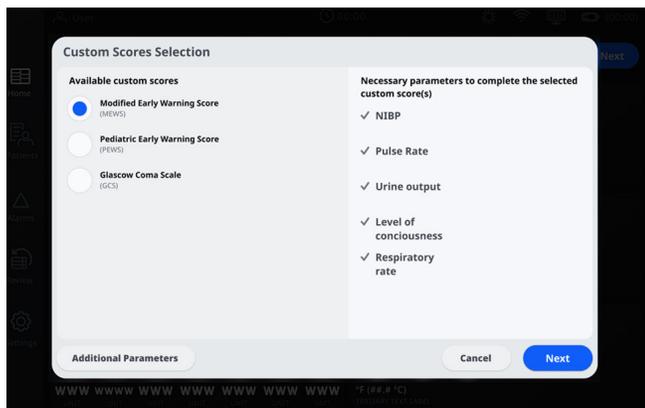


- Appuyez sur **Next** (Suivant) ou sélectionnez le paramètre souhaité dans l'écran Additional parameters (Paramètres supplémentaires).

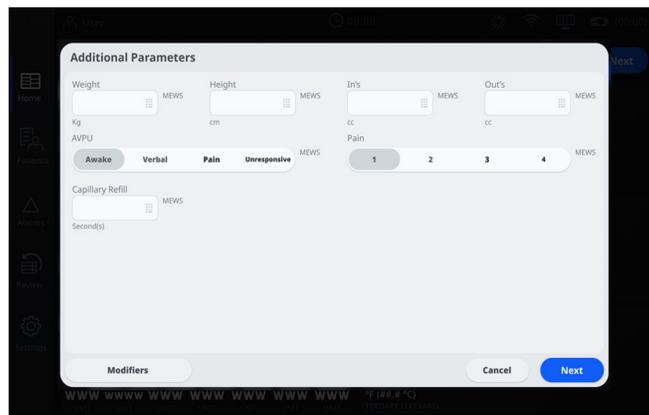

- Si plusieurs paramètres sont définis dans l'écran Additional parameters (Paramètres supplémentaires), appuyez sur **Next** (Suivant) jusqu'à ce que l'écran final s'affiche.

5. Notez les scores de risque, les messages de l'établissement et les réponses requises, puis appuyez sur **OK**.

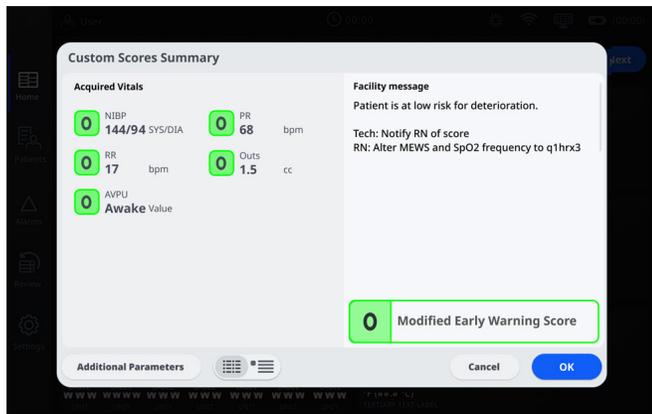

6. Appuyez sur **Save** (Enregistrer) pour enregistrer les données et effacer l'écran.



Déverrouillage de l'écran

Appuyez sur l'icône de verrouillage pour déverrouiller l'écran. Suivez les étapes ci-dessous pour les configurations d'authentification unique et pour l'authentification du médecin requise. Exemple d'écran affiché avec des intervalles en cours d'exécution et une connexion par ID du médecin configurée :



1. À l'aide d'un lecteur RFID, scannez votre badge d'identification.
2. (Facultatif) Vous pouvez aussi utiliser le pavé numérique pour saisir votre ID et votre mot de passe. Suivez les invites affichées pour déverrouiller l'écran.



Pour commencer, rendez-vous sur bax.to/getstarted pour obtenir davantage d'informations sur l'utilisation et l'entretien de votre produit.